

Pr **Rekovel®**
follitropine delta injection
Stylo prérempli

**Stylo prérempli REKOVELLE® (follitropine delta injection)
Guide d'utilisation pour les patientes**

N'utilisez le stylo prérempli REKOVELLE® qu'après avoir été formée par votre professionnel de la santé.


Une fois que votre professionnel de la santé vous aura montré comment utiliser correctement le stylo prérempli REKOVELLE®, ce guide peut servir de rappel utile.

Vous devez toujours lire le « mode d'emploi » fourni avec le stylo prérempli REKOVELLE® avant d'utiliser le stylo.

Une vidéo sur la façon d'utiliser le stylo prérempli REKOVELLE® est également disponible à l'adresse www.rekovel.ca.

STYLO PRÉREMPLI REKOVELLE® ET SES COMPOSANTS

- | | | |
|------------------------------------|------------------------|--|
| 1 – Capuchon externe de l'aiguille | 6 – Échelle de dose | 10 – Cartouche contenant le médicament |
| 2 – Capuchon interne de l'aiguille | 7 – Sélecteur de dose | 11 – Porte-cartouche |
| 3 – Aiguille | 8 – Bouton d'injection | 12 – Fenêtre d'affichage de dose |
| 4 – Languette de protection | 9 – Capuchon du stylo | |
| 5 – Indicateur de dose | | |

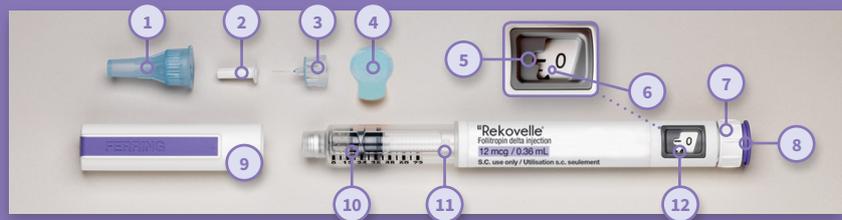

Le stylo prérempli REKOVELLE® est offert en trois concentrations:

12 mcg/0.36 mL

36 mcg/1.08 mL

72 mcg/2.16 mL

Avant d'utiliser votre stylo prérempli REKOVELLE®

- Vérifiez votre stylo prérempli REKOVELLE® pour vous assurer qu'il n'est pas endommagé. N'utilisez pas le stylo s'il a été échappé ou frappé sur une surface dure
- Vérifiez la cartouche du stylo pour voir si le médicament est limpide et ne contient aucune particule. N'utilisez pas un stylo si le médicament dans la cartouche contient des particules ou n'est pas limpide
- Vérifiez la date de péremption
- Voici d'autres articles dont vous aurez besoin :
 - Des tampons imbibés d'alcool
 - Des tampons d'ouate ou de gaze stériles
 - Un contenant imperforable pour l'élimination des aiguilles

REKOVELLE® (follitropine delta injection) est indiquée dans la stimulation ovarienne contrôlée pour le développement de follicules multiples chez les femmes qui se soumettent à un cycle de traitement par techniques de reproduction assistée (TRA), comme la fécondation in vitro (FIV) ou l'injection intracytoplasmique d'un spermatozoïde (ICSI).

Veillez consulter la monographie de produit sur <https://www.ferring.ca/fr/produits/santé-reproductive/> ou en nous appelant au 1 866-384-1314 pour vous renseigner sur les contre-indications, les mises en garde, les précautions, les effets indésirables, les interactions, le dosage et les conditions d'utilisation clinique.

Pour toute question ou demande de renseignement concernant le stylo prérempli REKOVELLE®, veuillez appeler votre professionnel de la santé ou Ferring Inc. au 1-866-384-1314.

PRÉPARATION ET AMORÇAGE DU STYLO PRÉREMPLI REKOVELLE®



Lavez et séchez vos mains avant d'utiliser le stylo. Retirez le capuchon du stylo. Retirez la languette de protection d'une nouvelle aiguille; vissez ou fixez l'aiguille sur le stylo. Enlevez les capuchons externe et interne de protection de l'aiguille. **Ne pas jeter le capuchon externe de protection de l'aiguille, vous en aurez besoin plus tard.**



Vous devez amorcer le stylo prérempli REKOVELLE® avant de l'utiliser pour la première fois, afin d'éliminer les bulles d'air qui peuvent se trouver dans la cartouche; **si vous avez déjà utilisé votre stylo, passez à l'étape 5 maintenant.** Pour amorcer un nouveau stylo, tournez le sélecteur de dose jusqu'à ce que le symbole de goutte  s'aligne avec l'indicateur de dose.



En tenant le stylo prérempli REKOVELLE® avec l'aiguille pointée vers le haut, tapotez doucement le porte-cartouche pour faire remonter les bulles d'air vers le haut.



Appuyez sans relâcher sur le bouton d'injection jusqu'à ce que le chiffre « 0 » s'aligne avec l'indicateur de dose et qu'une goutte de liquide apparaisse à l'extrémité de l'aiguille. **Si aucune goutte n'apparaît, répétez les étapes 2 à 4 jusqu'à ce qu'une goutte apparaisse au bout de l'aiguille. Si aucune goutte n'apparaît après cinq tentatives, retirez l'aiguille (étape 8), fixez une nouvelle aiguille et répétez l'amorçage (étapes 2 à 4).**

INJECTION DE DOSES FRACTIONNÉES

Si vous ne pouvez pas sélectionner la dose prescrite complète sur votre stylo, cela signifie qu'il n'y a plus assez de REKOVELLE® dans le stylo pour administrer la dose complète. Vous devrez vous injecter une partie de votre dose prescrite à l'aide de votre stylo actuel (première injection) et le reste de votre dose à l'aide d'un nouveau stylo (deuxième injection). Sinon, vous pouvez jeter votre stylo actuel et utiliser un nouveau stylo pour administrer la dose prescrite complète en une seule injection.

Pour administrer des doses fractionnées :

- sélectionnez la dose maximale qui reste dans le stylo (la dose restante dans le stylo) et notez ce chiffre;
- effectuez la première injection;
- préparez et amorcez un nouveau stylo en utilisant une nouvelle aiguille (étapes 1 à 4);
- calculez la dose restante en soustrayant la première dose (le chiffre que vous avez noté) de la dose prescrite complète;
- sélectionnez la dose restante sur votre stylo et effectuez la deuxième injection (étapes 5 à 8).

Le stylo prérempli REKOVELLE® permet de sélectionner une dose maximale de 20 mcg par injection. Si votre dose prescrite de REKOVELLE® est supérieure à 20 mcg, vous devrez la diviser en deux injections. Suivez les étapes a) à e) si vous utilisez un nouveau stylo ou les étapes d) à e) si vous utilisez votre stylo actuel. Utilisez toujours une nouvelle aiguille pour chaque injection.

Pour obtenir des instructions détaillées, y compris des instructions sur la façon d'arrondir vos doses et un journal des doses fractionnées, veuillez lire les pages 22 et 23 du mode d'emploi. Consultez votre professionnel de la santé si vous avez des questions sur la façon de calculer des doses fractionnées.

SÉLECTION DE VOTRE DOSE



Assurez-vous que la fenêtre d'affichage de dose indique « 0 », puis tournez le sélecteur de dose dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à la dose prescrite par votre professionnel de la santé. Chaque trait de l'échelle permet de modifier la dose de 0,33 mcg. En cas de doute au sujet de la sélection de la dose correcte, consultez votre professionnel de la santé.



Si vous avez accidentellement sélectionné la mauvaise dose, il est facile de la corriger en tournant le sélecteur de dose dans un sens ou dans l'autre jusqu'à ce que la dose correcte s'aligne avec l'indicateur de dose.

ADMINISTRATION DE L'INJECTION



Pour faire votre injection, nettoyez le site d'injection sur votre ventre (région abdominale) avec un tampon imbibé d'alcool. Pincez la peau avec le pouce et l'index et insérez l'aiguille du stylo en utilisant la technique d'injection recommandée par votre professionnel de la santé, en prenant soin de garder la fenêtre d'affichage de dose visible. Appuyez sur le bouton d'injection jusqu'au bout, et maintenez-le enfoncé. Lorsque vous voyez le chiffre « 0 » aligné sur l'indicateur de dose, **attendez 5 secondes avant de relâcher le bouton d'injection.** Après 5 secondes, retirez lentement l'aiguille du site d'injection.



Retirez l'aiguille utilisée du stylo en remplaçant soigneusement le capuchon externe de l'aiguille, puis en dévissant l'aiguille dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Jetez soigneusement l'aiguille utilisée conformément aux instructions de votre professionnel de la santé. Remplacez le capuchon sur le stylo prérempli REKOVELLE®.

